



LÁMINA ADHERENTE DE SILICONA PARA EL TRATAMIENTO DE CICATRICES

- No necesita fijación adicional.
- Se adapta al contorno del cuerpo.
- Puede llevarse en la actividades diarias.




Tecnología Safetac®


Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.safetac.com

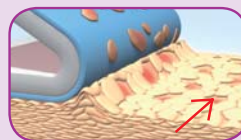


Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales

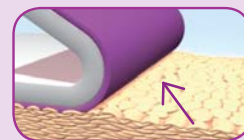


Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac


Forma de utilización de Mepiform®

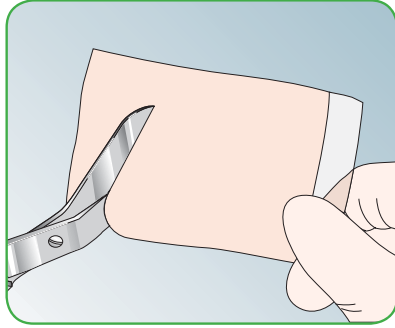

Quitar el papel protector.
Si es preciso puede cortarse.

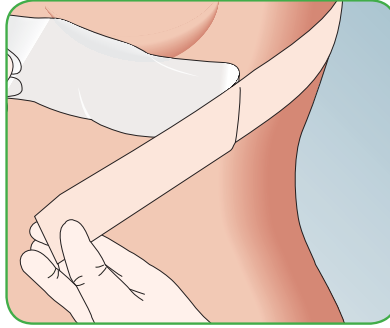

Aplicar Mepiform® sobre la cicatriz.

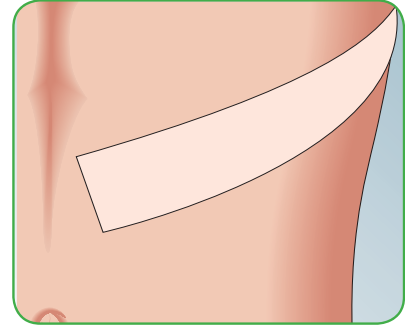

Reaplicar después de la limpieza diaria
de la cicatriz.

Cómo funciona Mepiform®

La silicona por vía tópica ha demostrado empíricamente un impacto positivo en cicatrices hipertróficas y queloides¹. Puede tardar desde 3 meses a más de un año en mejorar una cicatriz antigua dependiendo de las condiciones del tejido cicatricial. **Mepiform®** puede llevarse perfectamente las 24 horas del día. Se recomienda quitar **Mepiform®** una vez al día para inspección y lavado de la piel. En el tratamiento profiláctico de las cicatrices **Mepiform®** debe ser usado de 2 a 6 meses dependiendo de las condiciones de la cicatriz.

Indicaciones

Mepiform® está indicado para el tratamiento de:

- Cicatrices hipertróficas y queloides.
- Heridas cerradas donde previene la aparición de cicatrices hipertróficas y queloides.



Beneficios de Mepiform®

- No necesita fijación adicional.
- **Mepiform®** es delgado flexible y discreto.
- Puede llevarse en las actividades diarias.
- Puede volverse a aplicar.
- Una unidad de **Mepiform®** puede usarse durante 7 días o más.

Nota

Si apareciese maceración o picor, dejar que la piel descansa hasta que desaparezcan los síntomas.

Continuar el tratamiento incrementando gradualmente el tiempo cada día.

Mepiform® tiene un factor de protección ultravioleta equivalente a 7.72

PRESENTACIONES MEPIFORM® NO ESTÉRIL

nº Art.	C.N.	Tamaño cm	Uds/env.	Uds/transp.
293600	336016	4 x 30	5	50
293700	336636	5 x 7,5	5	25
293800	337873	10 x 18	5	35

Ref.

1. Quinn KJ (1987), Burns 13:33-40; Ahn ST et al (1991), Arch Surg 126:499-504; Dockery GL et al (1994), J Foot Ankle Surg 33:110-19; Katz BE (1995) Cutis 56:65-7; Carney SA et al (1994) Burns 20:163-7.

2. J.I Culum Maján, JoWC, Vol. 15, No 5 (5), 2006

3. AS/NZS 4399:1996.