

Desgarros cutáneos

Herida traumática resultante de diferentes fuerzas mecánicas, como la fricción y la cizalla (no se extiende a través de la capa subcutánea), incluyendo traumatismos cerrados, caídas, lesiones ocasionadas por equipamiento médico, o las que se producen tras la retirada de apósitos adherentes¹.

Clasificación¹:


1. **Tipo 1:** Sin pérdida de tejido, colgajo que puede volverse a colocar para cubrir el lecho de la herida.
2. **Tipo 2:** Pérdida parcial del colgajo, que no puede volverse a colocar para cubrir el lecho de la herida.
3. **Tipo 3:** Pérdida total del colgajo, que deja expuesto todo el lecho de la herida.



» Algoritmo de tratamiento: Desgarros Cutáneos

Heridas NO infectadas

Tipo 1
(no hay pérdida de colgajo)
Herida con exudado bajo

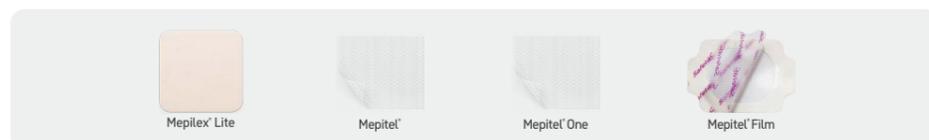

Tipo 2
(pérdida parcial de colgajo)
Herida con exudado medio



Tipo 3
(pérdida total de colgajo)
Herida con exudado elevado



Objetivo: prevenir infección, favorecer epitelización del tejido mediante cura en ambiente húmedo y protección ante agente traumático.

Heridas infectadas

Tipo 1
(no hay pérdida de colgajo)
Herida con exudado bajo



Tipo 2
(pérdida parcial de colgajo)
Herida con exudado medio



Tipo 3
(pérdida total de colgajo)
Herida con exudado elevado



Soluciones Mölnlycke

Mepitel®: Lámina de contacto con Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
290510	5 x 7,5	10	50
290710	7,5 x 10	10	40
291010	10 x 18	10	70
292005	20 x 30	5	30

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
491399*	7,5 x 10	3	60
491407*	10 x 18	3	42

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepitel® One: Lámina de contacto con Safetac® por una cara



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
289170	6 x 7	5	70
289270	9 x 10	5	50
289470	13 x 15	10	50
289670	24 x 27,5	5	30

Mepilex® Lite: Espuma fina de poliuretano



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
284000	6 x 8,5	5	70
284100	10 x 10	5	50
284300	15 x 15	5	50
284500	20 x 50	4	24

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
496679*	6 x 8,5	3	45
496687*	10 x 10	3	30
495754*	15 x 15	3	60

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Border Flex: Apósito multicapa con Tecnología Flex, sistema de monitorización del exudado y control de la carga bacteriana



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
595200	7,5 x 7,5	5	50
595300	10 x 10	5	50
595500	12,5 x 12,5	5	50
595400	15 x 15	5	25
595600	15 x 20	5	50

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
491126*	10 x 10	3	30
491134*	15 x 15	3	18

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Border Flex Lite: Apósito multicapa fino con Tecnología Flex y sistema de monitorización del exudado



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
581011	4 x 5	10	70
581100	5 x 12,5	5	65
581200	7,5 x 7,5	5	70
581300	10 x 10	5	50
581500	15 x 15	5	50

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
400118*	7,5 x 8,5	3	30
*400120	15 x 15	3	60

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Border Flex Oval: Apósito multicapa ovalado con Tecnología Flex, sistema de monitorización del exudado y control de la carga bacteriana



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
583500	7,8 x 10	5	50
583300	13 x 16	5	35
583400	15 x 19	5	45

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
400105*	15 x 19	3	15

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Exufiber®: Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA)



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
709900	5 x 5	10	40
709901	10 x 10	10	80
709903	15 x 15	10	60
709904	20 x 30	5	25
709908	1 x 45	5	25
709909	2 x 45	5	25

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
496760*	15 x 15	3	18

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Exufiber® Ag+: Apósito antimicrobiano de fibras de polivinilo de alcohol (PVA)



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
603401	5 x 5	10	40
603402	10 x 10	10	60
603403	15 x 15	10	60
603407	20 x 30	5	20
603400	2 x 45	5	20

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
496752*	10 x 10	3	18

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Ag: Apósito antimicrobiano de espuma de poliuretano con plata y tecnología Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
287110	10 x 10	5	70
287121	12,5 x 12,5	5	50
287310	15 x 15	5	25
287410	20 x 20	5	20
287510	20 x 50	2	12

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
495739*	10 x 10	3	18


*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Border Ag: Apósito multicapa antimicrobiano con Tecnología Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
395200	7,5 x 7,5	5	70
395300	10 x 10	5	50
395400	15 x 15	5	50
395600	15 x 20	5	45
395800	10 x 20	5	35
395900	10 x 30	5	25

Melgisorb® Ag: Apósito antimicrobiano de fibras de alginato

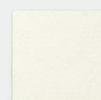

Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
256055	5 x 5	10	100
256105	10 x 10	10	100
256155	15 x 15	10	100
256205	20 x 30	10	50
256605	3 x 44	10	100

Mepilex® Transfer Ag: Apósito antimicrobiano de transferencia de exudado



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
394000	7,5 x 8,5	10	70
394100	10 x 12,5	5	50
394700	12,5 x 12,5	5	50
394800	15 x 20	10	50
394500	20 x 50	2	12

Mepilex® Up: Espuma comprimida de poliuretano con canales de absorción



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
212100	10 x 10	5	70
212300	15 x 15	5	25
212200	10 x 20	5	25
212400	20 x 20	5	25
212500	20 x 50	2	12

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
486902*	10 x 10	3	30
486910*	15 x 15	3	18
494039*	10 x 20	3	15

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex®: Apósito absorbente de espuma de poliuretano



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20

Mepitel® Film: Apósito para la protección de la piel



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
296170	6 x 7	10	50
296270	10 x 12	10	70
296470	10 x 25	10	50
296670	15 x 20	10	70

Referencias: 1. LeBlanc K et al. Best practice recommendations for the prevention and management of skin tears in aged skin. Wounds International 2018. Available to download from www.woundsinternational.com.

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª planta, 28050 Las Tablas (Madrid) Tel. 914841320

Mölnlycke, Mepilex, Exufiber, Melgisorb, Mepitel y Safetac son marcas, nombres y logotipos registrados por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2025 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.