


Úlceras por presión

Una lesión por presión¹ se define como un daño localizado en la piel y/o el tejido subyacente, como resultado de la presión o la presión en combinación con el cizallamiento. Las lesiones por presión generalmente ocurren sobre una prominencia ósea, pero también pueden estar relacionadas con un dispositivo médico u otro objeto.

Clasificación¹:

1. **Categoría I:** Eritema no blanqueable, piel intacta.
2. **Categoría II:** Úlcera de espesor parcial
3. **Categoría III:** Pérdida total del grosor de la piel
4. **Categoría IV:** Pérdida total del espesor de los tejidos
5. **Lesión no estadiable:** Profundidad desconocida
6. **Sospecha de lesión de tejidos profundos:** Profundidad desconocida

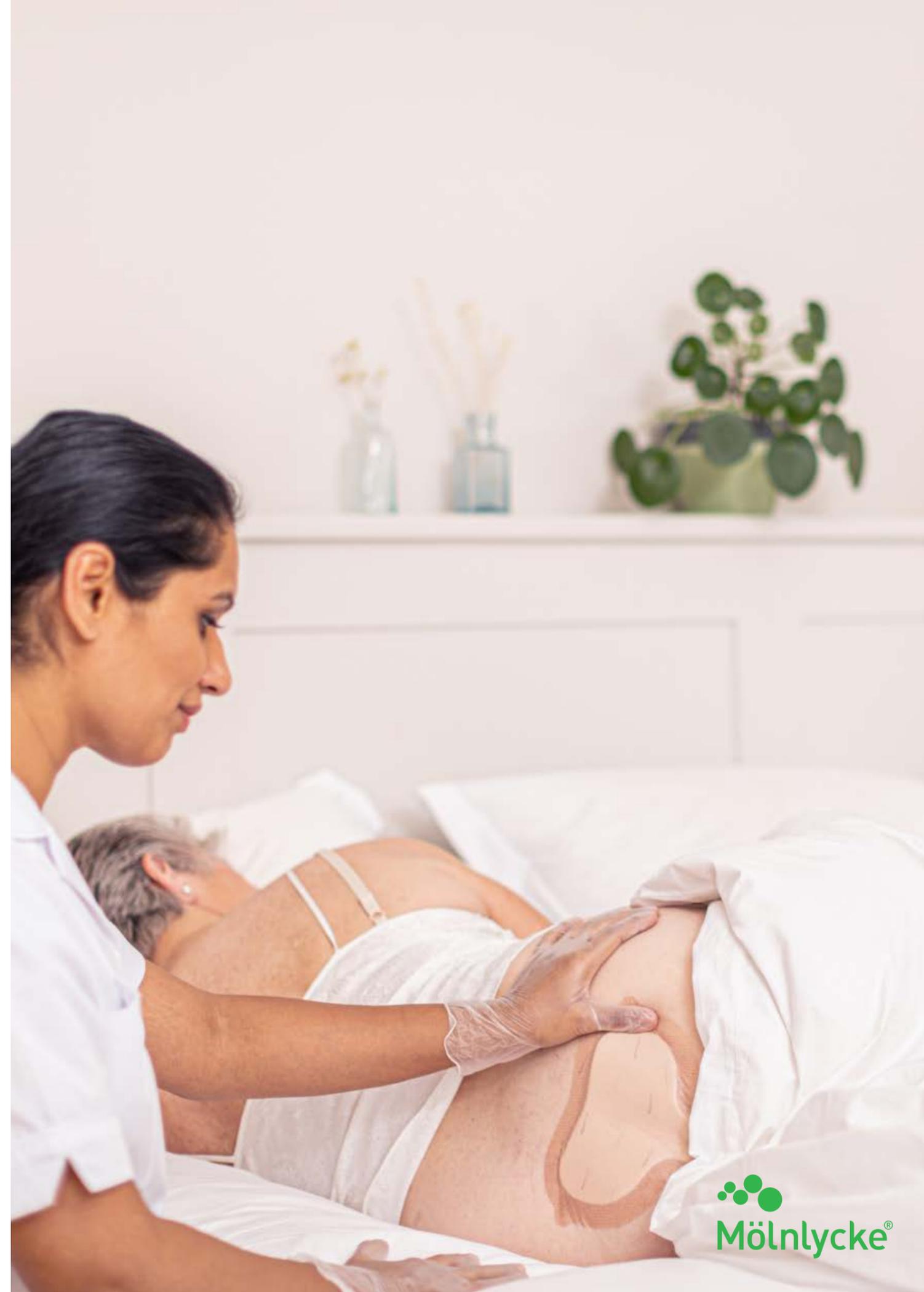

» Algoritmo de prevención: Úlceras por Presión

► PREVENCIÓN

Presión en prominencia ósea, cizalla, fricción y humedad

Sacro



Mepilex[®] Border Sacrum

Talón



Mepilex[®] Border Heel

Mepilex[®] Heel

Otras zonas anatómicas



Mepilex[®] Border Flex



Mepilex[®] Border Flex Oval

Prevención en dispositivos médicos



Mepilex[®] Border Flex Lite



Mepilex[®]




Mepilex[®] Lite



Mepitel[®] Film





» Algoritmo de tratamiento: Úlceras por Presión en el sacro


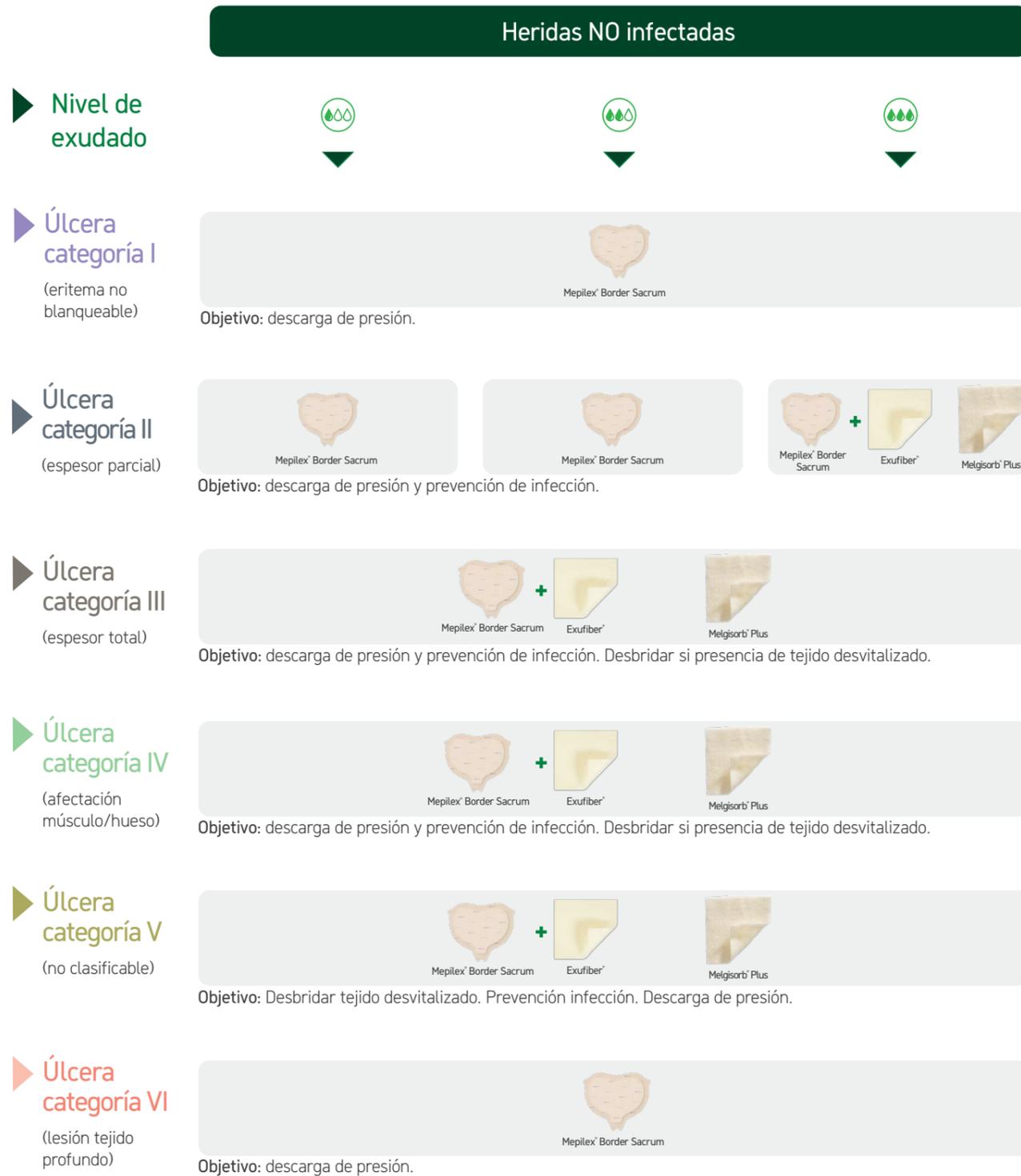


*En úlceras a partir de categoría II en sacro se recomienda tratamiento con apósitos antimicrobianos por riesgo de infección alto.

» Algoritmo de tratamiento: Úlceras por Presión en el talón

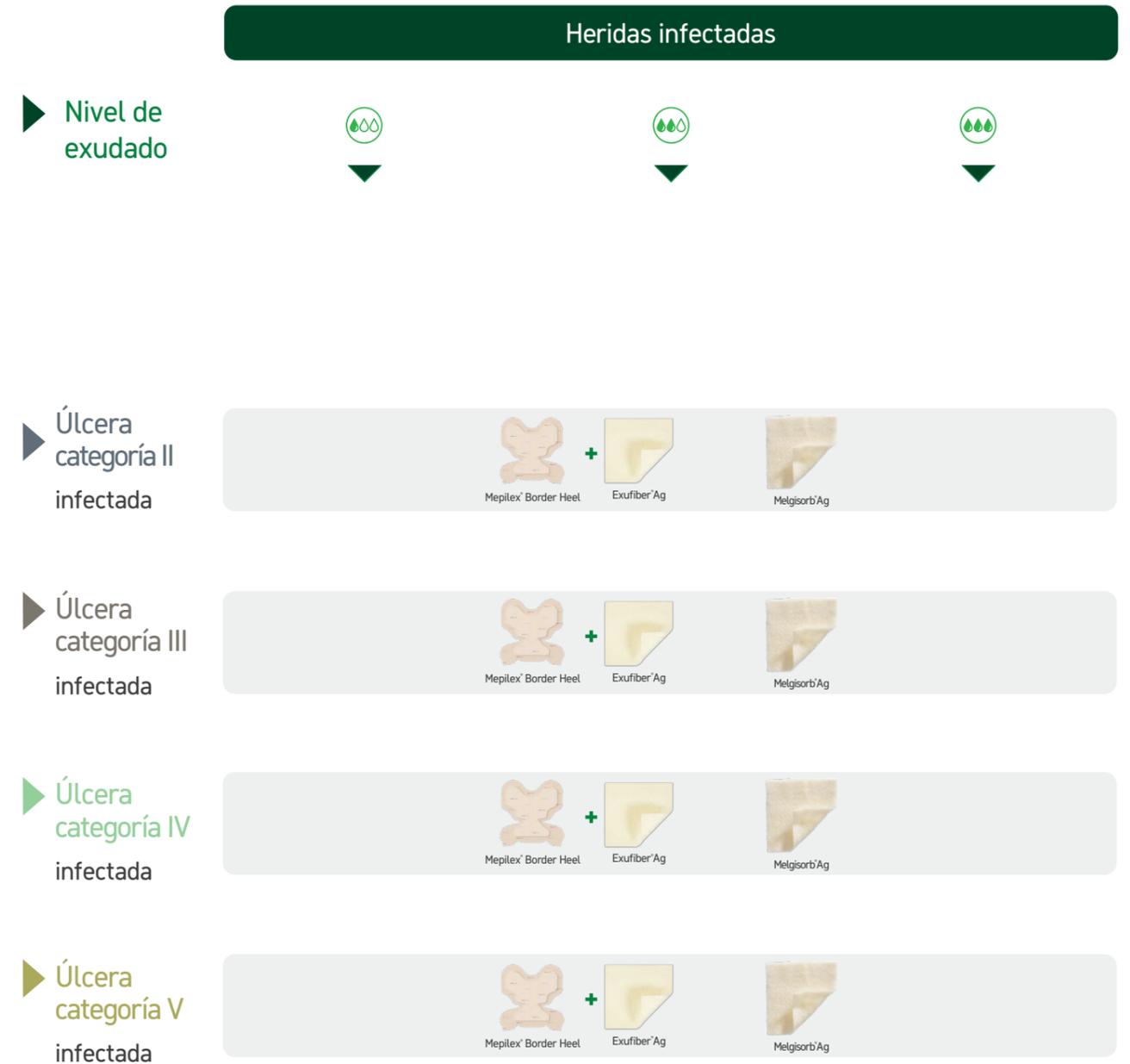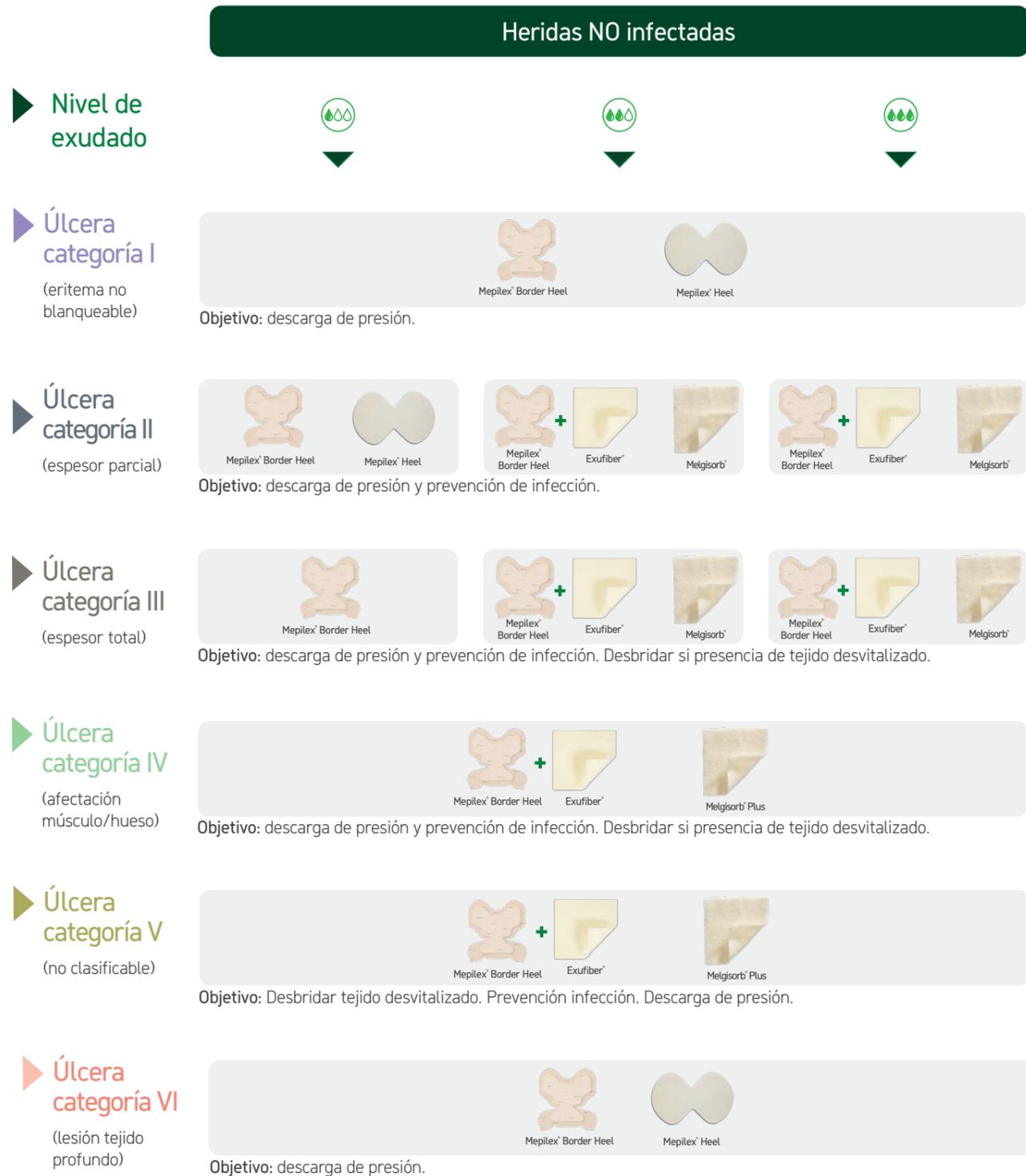

» Algoritmo de tratamiento: Úlceras por Presión en otras zonas antómicas

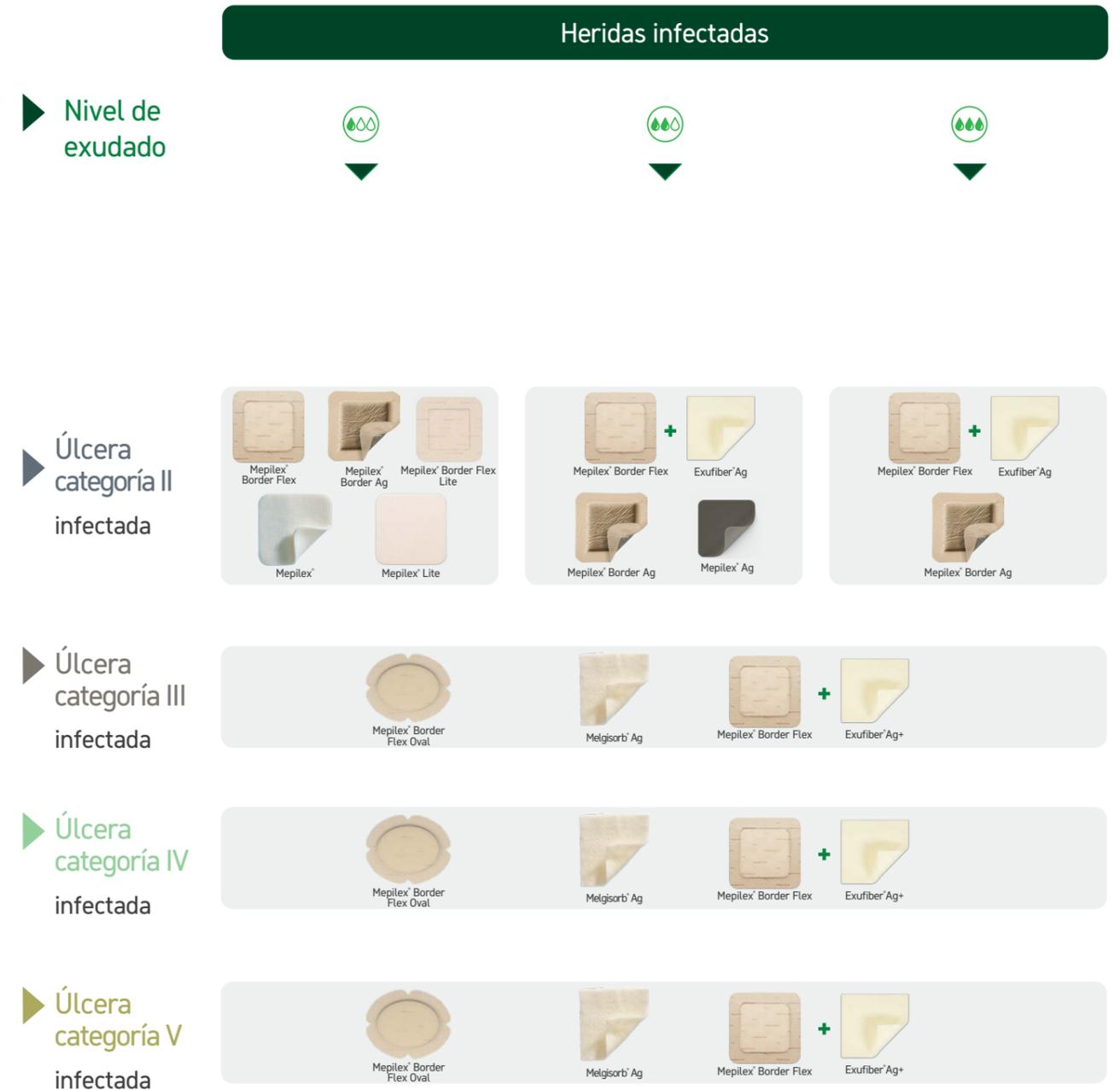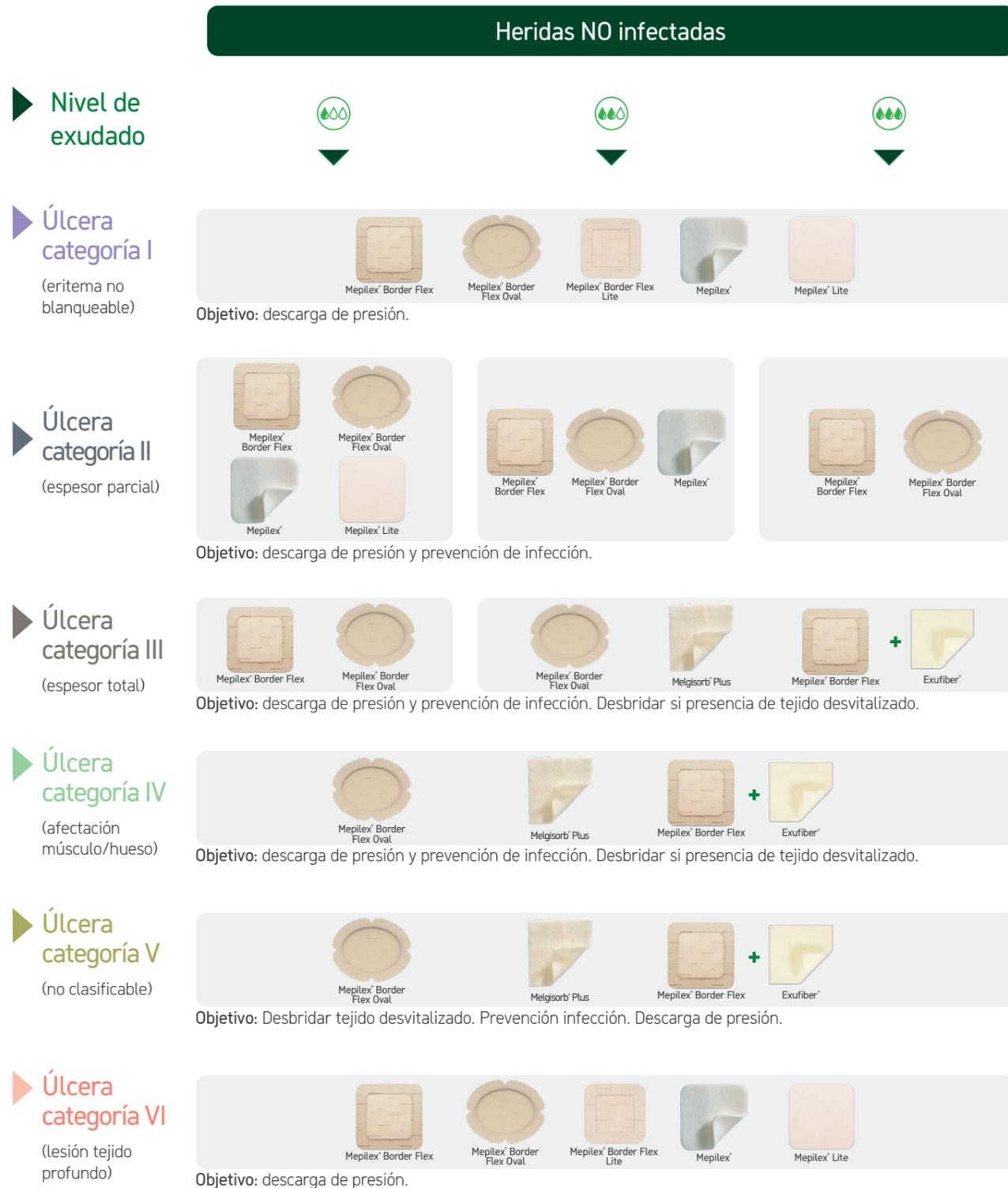

*En úlceras a partir de categoría II en sacro se recomienda tratamiento con apósitos antimicrobianos por riesgo de infección alto.

Soluciones Mölnlycke

Mepilex® Border Sacrum: Apósito multicapa para el sacro con Tecnología Deep Defense®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
282410	22 x 25	10	30
282010	16 x 20	10	30

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
495747*	22 x 25	3	18

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Border Heel: Apósito multicapa para el talón con Tecnología Deep Defense®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
282710	22 x 23	10	30

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
496695*	22 x 23	3	15

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Heel: Espuma de poliuretano para el talón con Tecnología Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
288100	13 x 20	5	25

Mepilex® Border Flex: Apósito multicapa con Tecnología Flex, sistema de monitorización del exudado y control de la carga bacteriana



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
595200	7,5 x 7,5	5	50
595300	10 x 10	5	50
595500	12,5 x 12,5	5	50
595400	15 x 15	5	25
595600	15 x 20	5	50

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
491126*	10 x 10	3	30
491134*	15 x 15	3	18

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Border Flex Lite: Apósito multicapa fino con Tecnología Flex y sistema de monitorización del exudado



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
581011	4 x 5	10	70
581100	5 x 12,5	5	65
581200	7,5 x 7,5	5	70
581300	10 x 10	5	50
581500	15 x 15	5	50

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
400118*	7,5 x 8,5	3	30
*400120	15 x 15	3	60

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Border Flex Oval: Apósito multicapa ovalado con Tecnología Flex y sistema de monitorización del exudado



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
583500	7,8 x 10	5	50
583300	13 x 16	5	35
583400	15 x 19	5	45

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
400105*	15 x 19	3	15

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Exufiber®: Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA)



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
709900	5 x 5	10	40
709901	10 x 10	10	80
709903	15 x 15	10	60
709904	20 x 30	5	25
709908	1 x 45	5	25
709909	2 x 45	5	25

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
496760*	15 x 15	3	18

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Exufiber® Ag+: Apósito antimicrobiano de fibras de polivinilo de alcohol (PVA)



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
603401	5 x 5	10	40
603402	10 x 10	10	60
603403	15 x 15	10	60
603407	20 x 30	5	20
603400	2 x 45	5	20

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
496752*	10 x 10	3	18

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Ag: Apósito antimicrobiano de espuma de poliuretano con plata y tecnología Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
287110	10 x 10	5	70
287121	12,5 x 12,5	5	50
287310	15 x 15	5	25
287410	20 x 20	5	20
287510	20 x 50	2	12

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
495739*	10 x 10	3	18

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepilex® Border Ag: Apósito multicapa antimicrobiano con Tecnología Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
395200	7,5 x 7,5	5	70
395300	10 x 10	5	50
395400	15 x 15	5	50
395600	15 x 20	5	45
395800	10 x 20	5	35
395900	10 x 30	5	25

Melgisorb® Plus: Apósito de fibras de alginato



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
252000	5 x 5	10	100
252200	10 x 10	10	100
252500	10 x 20	10	100
253500	3 x 45	5	50

Melgisorb® Ag: Apósito antimicrobiano de fibras de alginato



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
256055	5 x 5	10	100
256105	10 x 10	10	100
256155	15 x 15	10	100
256205	20 x 30	10	50
256605	3 x 44	10	100

Mepilex®: Apósito absorbente de espuma de poliuretano



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20

Mepilex® Lite: Espuma fina de poliuretano



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
284000	6 x 8,5	5	70
284100	10 x 10	5	50
284300	15 x 15	5	50
284500	20 x 50	4	24

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
496679*	6 x 8,5	3	45
496687*	10 x 10	3	30
495754*	15 x 15	3	60

*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

Mepitel® Film: Apósito para la protección de la piel



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
296170	6 x 7	10	50
296270	10 x 12	10	70
296470	10 x 25	10	50
296670	15 x 20	10	70

Referencias: 1. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª planta. 28050 Las Tablas (Madrid) Tel. 914841320

Mölnlycke, Mepilex, Exufiber, Melgisorb, Mepitel y Safetac son marcas, nombres y logotipos registrados por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2025 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.