

# Úlceras vasculares

Las úlceras vasculares son lesiones superficiales o profundas causadas por una pérdida en la integridad cutánea. En la mayor parte de las ocasiones se originan por alteraciones en la circulación y aparecen generalmente en la mitad inferior de la pierna<sup>1,2</sup>.

Suelen ser dolorosas y dificultan la movilidad de los pacientes. Además son lesiones de difícil cicatrización y en muchos casos poseen un carácter crónico y/o recidivante, es decir, que tras la total curación de las mismas es muy probable que vuelvan a aparecer<sup>1,2</sup>.

La duración media del tratamiento es de 6 semanas o más<sup>1,2</sup>.

Las úlceras vasculares suponen un problema de salud importante, ya que las sufren entre el 1 y 3% de la población<sup>1,2</sup>.

Diagnóstico diferencial	Venosas	Arteriales
Localización	Tercio inferior pierna. Más frecuente en área supramaleolar interna.	Tercio inferior pierna sobre prominencias óseas. Dedos. Maléolo externo. Talones.
Aspecto	Tendencia a la granulación. Superficiales con bordes irregulares. Generalmente únicas, de tamaño variable que tienden a aumentar.	Fondo atrófico. Escasa tendencia a la granulación. Bordes definidos. Generalmente pequeñas y con frecuencia múltiples.
Exudado	Moderado/Abundante	Escaso/Nulo
Edema	Presente	Ausente
Temperatura	Normal	Fría*
Piel perilesional	Eczema. Dermatitis. Hiperpigmentación.	Pálida y brillante. Ausencia de vello. Frágil y seca.
Dolor	Mínimo. Excepto cuando está infectada.	Intenso. Aumento de dolor en decúbito/reposo.

\* (si no hay neuropatía)

Las úlceras mixtas son úlceras que conllevan una componente arterial (normalmente de patología arterial periférica) y otra venosa. Pueden surgir características de ambos tipos, presentando los signos acorde a la etiología predominante.


- IPTB 0.8-1.3 – Venosa
- IPTB 0.5-0.8 – Mixta
- IPTB < 0.5 – Arterial

Terapia	Venosas	Arteriales
Prevención y cuidados generales	Medidas para favorecer el retorno venoso y linfático: Contención elástica - Venda o media	Medidas para mejorar la perfusión tisular. Abandono del tabaco.
Hábitos higiénico-posturales	Aseo diario. Hidratación de la piel. Reposo en la cama, con elevación de las piernas. Dieta adecuada para mantener el peso. Evitar estreñimiento. Ejercicio físico moderado. Caminar a diario. Subir escaleras, etc.	Aseo diario. Hidratación de la piel. Cuidado de los pies. Evitar el frío. Ropa y calzado adecuados. Fomentar la deambulación adaptándose a la situación de cada persona. Dieta equilibrada. Control de las enfermedades asociadas: HTA, Diabetes, Dislipemias.
Tratamiento quirúrgico	En caso necesario	Revascularización en caso necesario.
Tratamiento local	Limpieza local. Desbridamiento si precisa. Control del exudado. Vigilancia y control de la carga bacteriana. Favorecer la cicatrización manteniendo un medio ambiente húmedo. Contención: venda o media.	<u>Úlcera no infectada</u> Limpieza total. Mantener cura en ambiente seco.  <u>Úlcera infectada</u> Limpieza local. Remisión inmediata al especialista.  <u>Herida abierta no infectada</u> Limpieza local. Mantener medio ambiente húmedo. Usar con recaución apósitos oclusivos.

## » Algoritmo de tratamiento: Úlceras vasculares

### Heridas NO infectadas



► Nivel de exudado

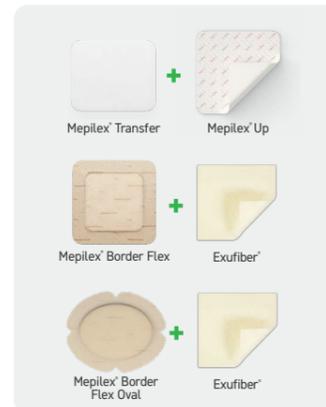

► Úlceras Venosas

Observaciones: en úlceras venosas: coadyugar tratamiento con terapia compresiva para favorecer retorno venoso.



► Úlceras Arteriales

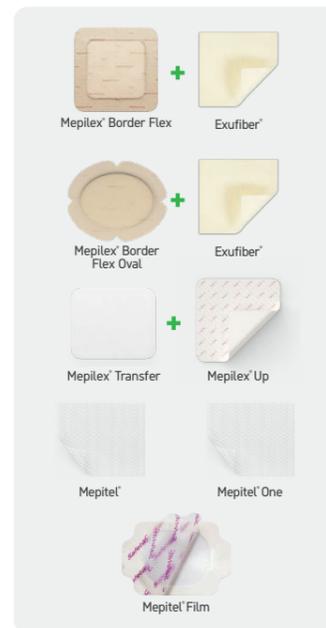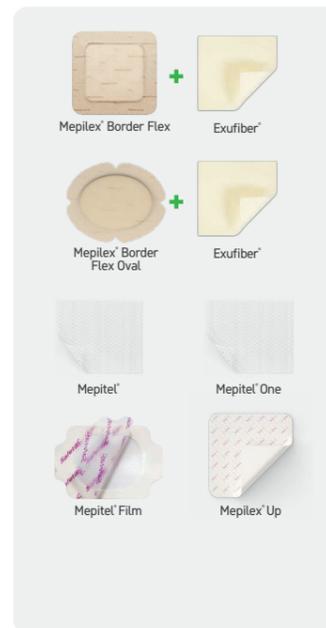

Observaciones en úlceras arteriales: proporcionar humedad con hidrogel.



### Heridas infectadas

► Nivel de exudado

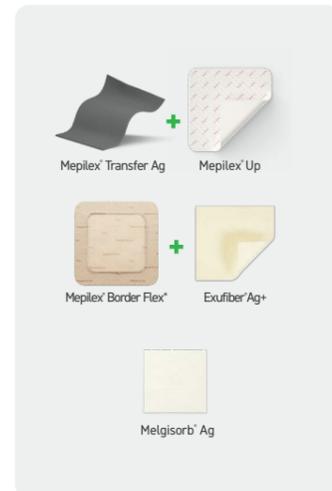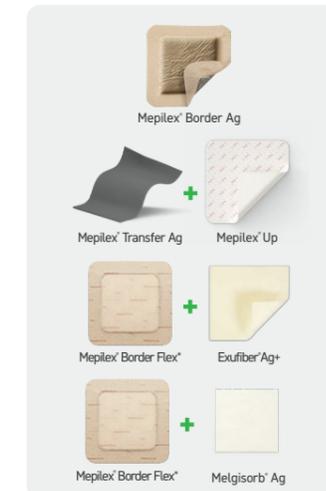

► Úlceras Venosas

► Úlceras Arteriales

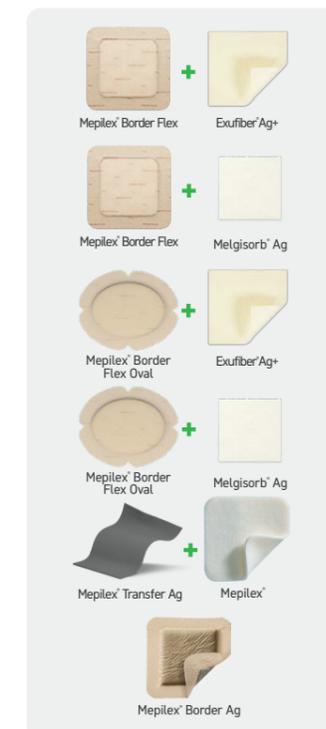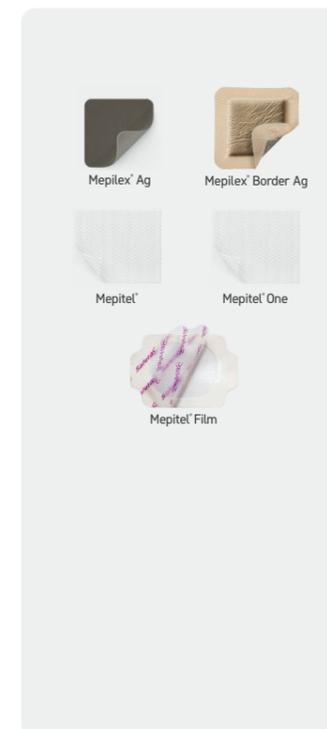

\*Disponible en formato oval (Mepilex' Border Flex Oval)

# Soluciones Mölnlycke

## Mepitel®: Lámina de contacto con Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
290510	5 x 7,5	10	50
290710	7,5 x 10	10	40
291010	10 x 18	10	70
292005	20 x 30	5	30

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
491399*	7,5 x 10	3	60
491407*	10 x 18	3	42

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

## Mepitel® One: Lámina de contacto con Safetac® por una cara



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
289170	6 x 7	5	70
289270	9 x 10	5	50
289470	13 x 15	10	50
289670	24 x 27,5	5	30

## Mepitel® Film: Apósito para la protección de la piel



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
296170	6 x 7	10	50
296270	10 x 12	10	70
296470	10 x 25	10	50
296670	15 x 20	10	70

## Mepilex® Border Flex: Apósito multicapa con Tecnología Flex, sistema de monitorización del exudado y control de la carga bacteriana



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
595200	7,5 x 7,5	5	50
595300	10 x 10	5	50
595500	12,5 x 12,5	5	50
595400	15 x 15	5	25
595600	15 x 20	5	50

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
491126*	10 x 10	3	30
491134*	15 x 15	3	18

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

## Mepilex® Border Flex Oval: Apósito multicapa ovalado con Tecnología Flex, sistema de monitorización del exudado y control de la carga bacteriana



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
583500	7,8 x 10	5	50
583300	13 x 16	5	35
583400	15 x 19	5	45

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
400105*	15 x 19	3	15

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

## Mepilex® Up: Espuma comprimida de poliuretano con canales de absorción



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
212100	10 x 10	5	70
212300	15 x 15	5	25
212200	10 x 20	5	25
212400	20 x 20	5	25
212500	20 x 50	2	12

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
486902*	10 x 10	3	30
486910*	15 x 15	3	18
494039*	10 x 20	3	15

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

## Exufiber®: Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA)



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
709900	5 x 5	10	40
709901	10 x 10	10	80
709903	15 x 15	10	60
709904	20 x 30	5	25
709908	1 x 45	5	25
709909	2 x 45	5	25

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
496760*	15 x 15	3	18

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

## Exufiber® Ag+: Apósito antimicrobiano de fibras de polivinilo de alcohol (PVA)



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
603401	5 x 5	10	40
603402	10 x 10	10	60
603403	15 x 15	10	60
603407	20 x 30	5	20
603400	2 x 45	5	20

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
496752*	10 x 10	3	18

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

## Mepilex® Ag: Apósito antimicrobiano de espuma de poliuretano con plata y tecnología Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
287110	10 x 10	5	70
287121	12,5 x 12,5	5	50
287310	15 x 15	5	25
287410	20 x 20	5	20
287510	20 x 50	2	12

C.N.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
495739*	10 x 10	3	18

\*Apósito financiado por el Sistema Nacional de Salud sólo para el tratamiento de lesiones.

## Mepilex® Border Ag: Apósito multicapa antimicrobiano con Tecnología Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
395200	7,5 x 7,5	5	70
395300	10 x 10	5	50
395400	15 x 15	5	50
395600	15 x 20	5	45
395800	10 x 20	5	35
395900	10 x 30	5	25

## Melgisorb® Ag: Apósito antimicrobiano de fibras de alginato



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
256055	5 x 5	10	100
256105	10 x 10	10	100
256155	15 x 15	10	100
256205	20 x 30	10	50
256605	3 x 44	10	100

## Mepilex® Transfer Ag: Apósito antimicrobiano de transferencia de exudado



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
394000	7,5 x 8,5	10	70
394100	10 x 12,5	5	50
394700	12,5 x 12,5	5	50
394800	15 x 20	10	50
394500	20 x 50	2	12

## Mepilex®: Apósito absorbente de espuma de poliuretano



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20

## Mepilex® Transfer: Apósito de transferencia de exudado con Safetac®



Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
294800	15 x 20	5	40
294502	20 x 50	4	24

Referencias: 1. Wounds UK (2019) Best Practice Statement: Addressing complexities in the management of venous leg ulcers. London: Wounds UK. Available to download from: [www.wounds-uk.com](http://www.wounds-uk.com). 2. Marine, Lo Roura J, Verdú Soriano J (Coord.). Conferencia nacional de consenso sobre las úlceras de la extremidad inferior (C.O.N.U.E.I.). Documento de consenso 2018. 2ª ed. Madrid: Ergon; 2018.

## Más información en [www.molnlycke.es](http://www.molnlycke.es)

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª planta. 28050 Las Tablas (Madrid) Tel. 914841320

Mölnlycke, Mepilex, Exufiber, Melgisorb, Mepitel y Safetac son marcas, nombres y logotipos registrados por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2025 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.