

Previene y reduce las cicatrices

Lámina de silicona
para el tratamiento de cicatrices



Mepiform®


Mölnlycke®

Diseñado para el tratamiento diario

El proceso de curación de una herida puede variar y el aspecto final de una cicatriz depende de varios factores, como el tipo de piel, la zona donde se ha producido la lesión, la genética de cada uno y el tipo de intervención quirúrgica, entre otros.

¿Qué puede hacer un paciente para reducir la aparición, el enrojecimiento o el grosor de la cicatriz y conseguir el mejor resultado posible?

La respuesta es **tratar la cicatriz**.


Las láminas de gel de silicona tópica se usan desde hace más de 20 años para tratar cicatrices hipertróficas⁴ y queloides⁵ y están avaladas por numerosas evaluaciones clínicas y recomendaciones internacionales sobre el tratamiento de cicatrices⁶.

Mepiform® es una **lámina fina y discreta de silicona** diseñada para reducir cicatrices hipertróficas y queloides y también puede ser utilizado como terapia profiláctica en heridas cerradas para prevenir la formación de cicatrices hipertróficas o queloides.

La capa con Safetac® de suave silicona se adhiere y se adapta a los contornos del cuerpo, al contrario que otros adhesivos que apenas se adhieren a la superficie de la piel. La capa con Safetac también minimiza el dolor durante los cambios de apósito,^{1,2,3} minimizando la maceración.

Mepiform está clínicamente probado en la reducción y prevención de cicatrices.

Mepiform®

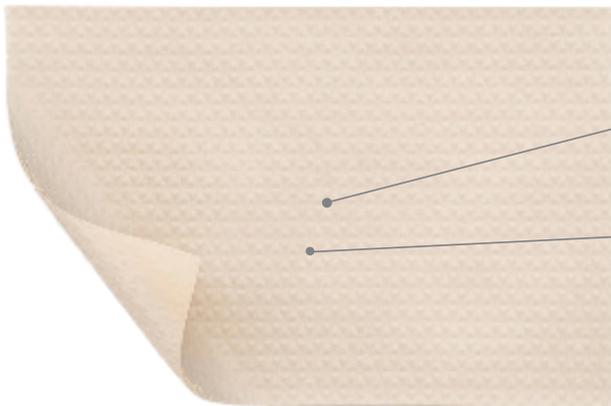

No produce dolor en la retirada gracias a **Safetac®**

Muy eficaz en el tratamiento de cicatrices



Adaptable



Reutilizable



Autoadherente




Discreto

Evidencia demostrada clínicamente

'Los mejores resultados en el tratamiento de cicatrices, hoy en día, están relacionados con el uso de la silicona. Para maximizar sus beneficios, es importante entender qué tipo de silicona y cuando se debe utilizar. El beneficio principal que buscamos en un producto es su capacidad de prevenir la formación de cicatrices hipertróficas y queloides. El tratamiento debe ser eficiente y cómodo para el paciente.'

'Durante muchos años hemos podido probar todo tipo de apósitos y otros productos con silicona para la reducción de cicatrices, y durante este tiempo hemos podido observar que Mepiform es el producto perfecto en relación a los resultados obtenidos y la satisfacción del paciente. Día tras día el uso de Mepiform es cada vez mayor al ser muchos los pacientes y profesionales que descubren sus beneficios. En la consulta con el paciente elegimos el tipo específico de silicona a utilizar dependiendo del tipo de cicatriz que tiene, en qué zona está localizada, el tiempo de cura, el color, etc... La mayor preocupación del paciente es el aspecto y el tacto de su cicatriz. Cuando los pacientes acuden a un cirujano lo único que le piden es un procedimiento seguro; cuando visitan un cirujano plástico esperan una intervención segura pero con resultados estéticos. Esa es la razón por la cual recomendamos el uso de Mepiform desde hace 6 años.'

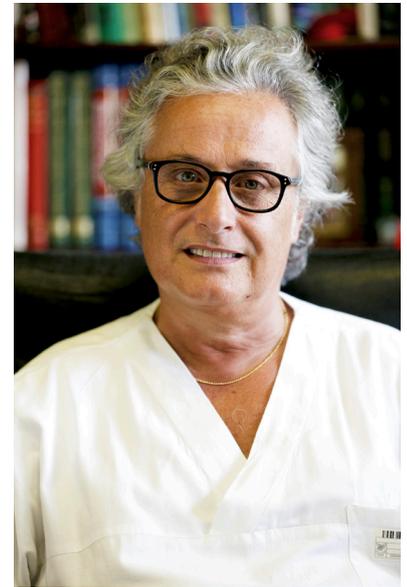

Prof. Franco Bassetto

Profesor de Cirugía plástica, reconstructiva y estética y jefe de la clínica de cirugía plástica del Hospital universitario de Padua, Italia




Después de una cirugía donde los resultados estéticos realmente importan, el uso de Mepiform reduce significativamente el color y el grosor de la cicatriz.



Las cicatrices llevan su tiempo para formarse, a veces hasta 18 meses. Pero con paciencia y con el uso diario de Mepiform, los resultados en el paciente son visibles.


Eficacia clínicamente testada

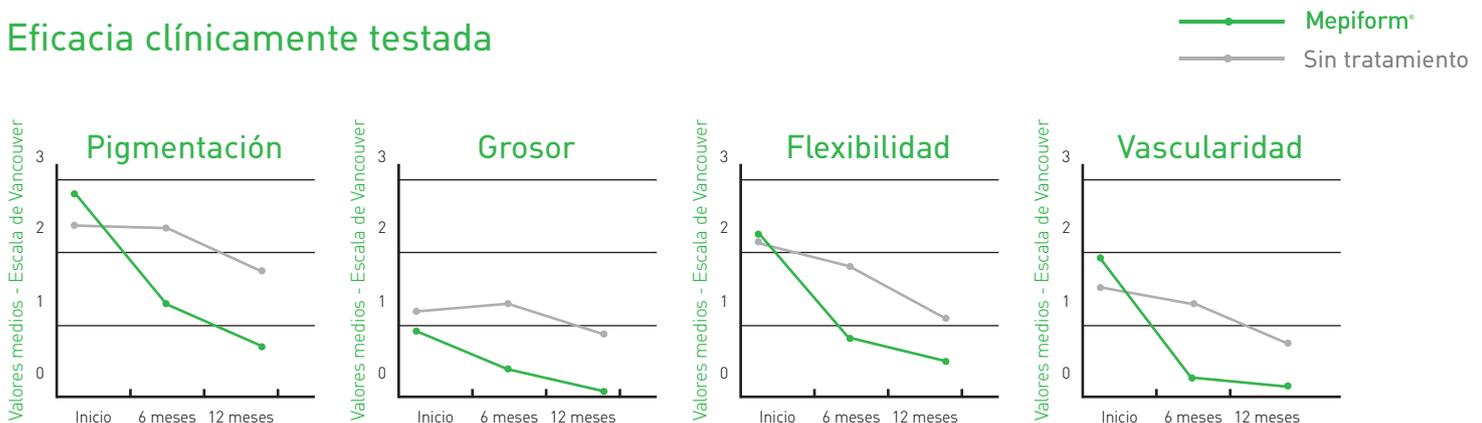

Gráficos pertenecientes al estudio "Tratamiento con un apósito autoadhesivo de suave silicona versus no tratamiento en cicatrices postoperatorias". Dr. J.I. Colom Maján. Departamento de Cirugía Plástica, Instituto de Ciencias Especiales, Madrid.

Forma de utilización


Mepiform® se adapta perfectamente a cualquier zona del cuerpo. Es la **solución más flexible** para tratar las cicatrices, indicada para todos los estilos de vida, para que el paciente pueda retomar su vida diaria con normalidad.

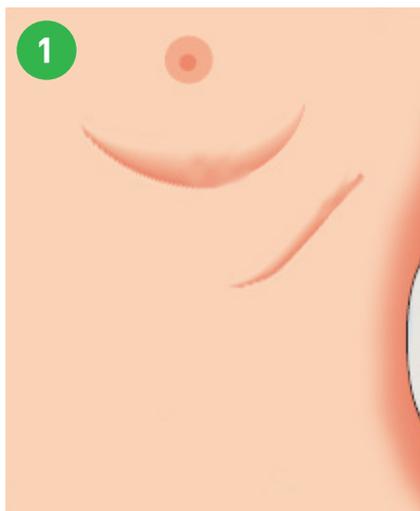

Mepiform® es más eficaz cuando se aplica en una cicatriz recién formada.




Al contrario que otros apósitos, puede cortar **Mepiform**, hasta obtener el tamaño adecuado, dejando al menos 1cm por cada lado.

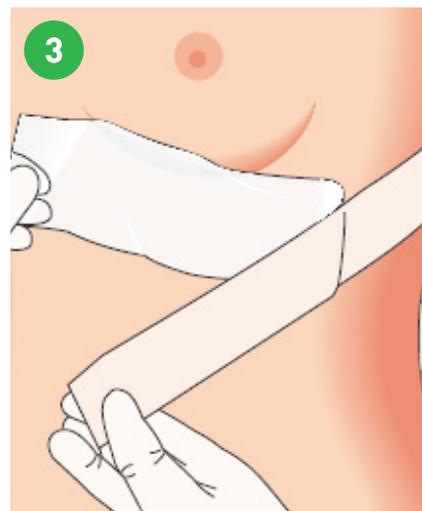


Quite el papel protector y aplique **Mepiform** dejando 1 cm. por cada lado.



Para un mejor resultado, puede llevar **Mepiform** durante 24 horas al día, incluso durante la ducha y el baño.

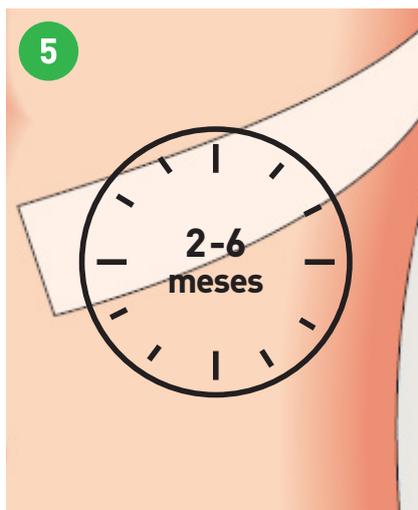

Se recomienda una duración del tratamiento entre 2 y 6 meses dependiendo de las condiciones de la cicatriz.

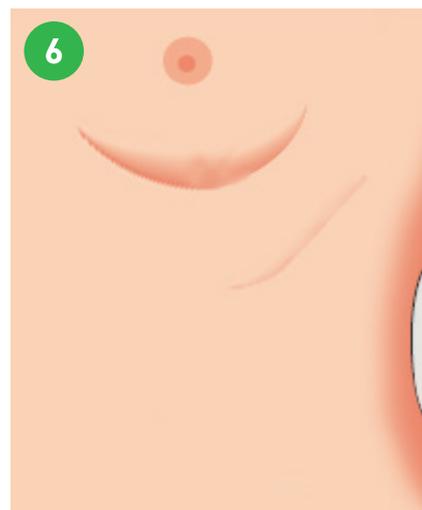


Es recomendable inspeccionar y lavar la piel diariamente.

Guía de cortes


Uno de los beneficios de **Mepiform**[®] es que lo puede recortar con cualquier forma y tamaño que desee. Para cicatrices que resultan de una cirugía de mama recórtelo en una forma curva para que se adapta perfectamente a la axila o mama. En caso de cesárea es importante que lo coloque en una sola pieza sin que se solape, cubriendo totalmente la cicatriz. Para el tratamiento de quemaduras, **Mepiform** también actúa como protección frente a la luz solar, ya que tiene factor de protección 7.4.




Formas para cicatrices de cirugía de mama:

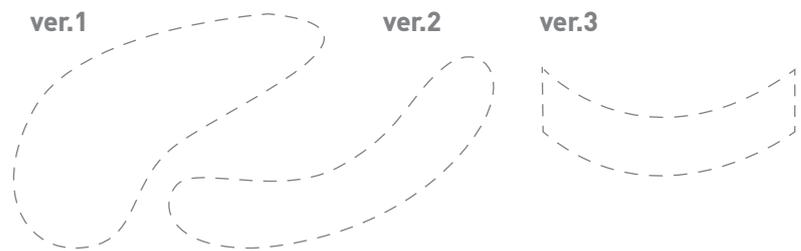

Formas para cicatrices de cesárea:

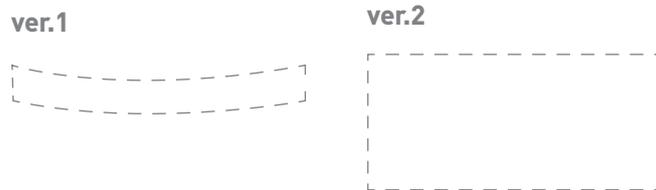

Formas para cicatrices de quemaduras:

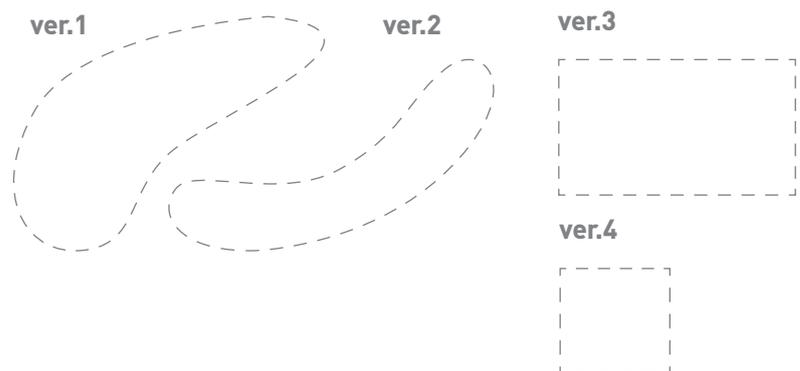

La silicona se ha utilizado con éxito en el tratamiento de cicatrices, desde hace décadas, pero los resultados con láminas de silicona, como **Mepiform®**, son muy superiores



Mepiform®

C.N.	Tamaño cm
336636	5 x 7,5
336016	4 x 30
337873	10 x 18



Referencias:

1. Wound Union of Wound Healing Societies. Principles of best practice. Minimizing pain at wound dressing related procedures. A consensus document. 2004. Published by Medical Educational Partnership London. 2. Principles of best practice: Minimizing pain at dressing-related procedures. A consensus document. Toronto, Ontario, Canada: ©WoundPedia Inc 2007. 3. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Jo WC Vol10, No 2 (2001), p. 7-10. 4. Maján J.I et al. Evaluation of a self-adherent soft silicone dressing for the treatment of hypertrophic postoperative scars. Jo WC, Vol15, No 5 (2006), p.193-6. 5. Swedish Institute for Fibre and Polymer Research (1998). 6. Mustoe, T.A., Cooter, R.D., Gold, M.H. et al. International Advisory Panel on Scar Management. International clinical recommendations on scar management. Plast Reconstr Surg 2002; 110: 2, 560-571.

Gratuito 900 15 06 81 o en www.mepiform.es

Descubra más en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Av. de la Vega 15, Edif.3 - 3ª Planta. 28108 Alcobendas (Madrid) Tel. 914841320
Los nombres, logotipos y marcas comerciales de Mölnlycke, Mepiform y Safetac están registrados por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. ©2019 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.

Mölnlycke®