


Mepilex® Up

Un nuevo e innovador apósito de espuma diseñado para minimizar el riesgo de fugas¹. Inspirado en las necesidades de los pacientes y de los profesionales.

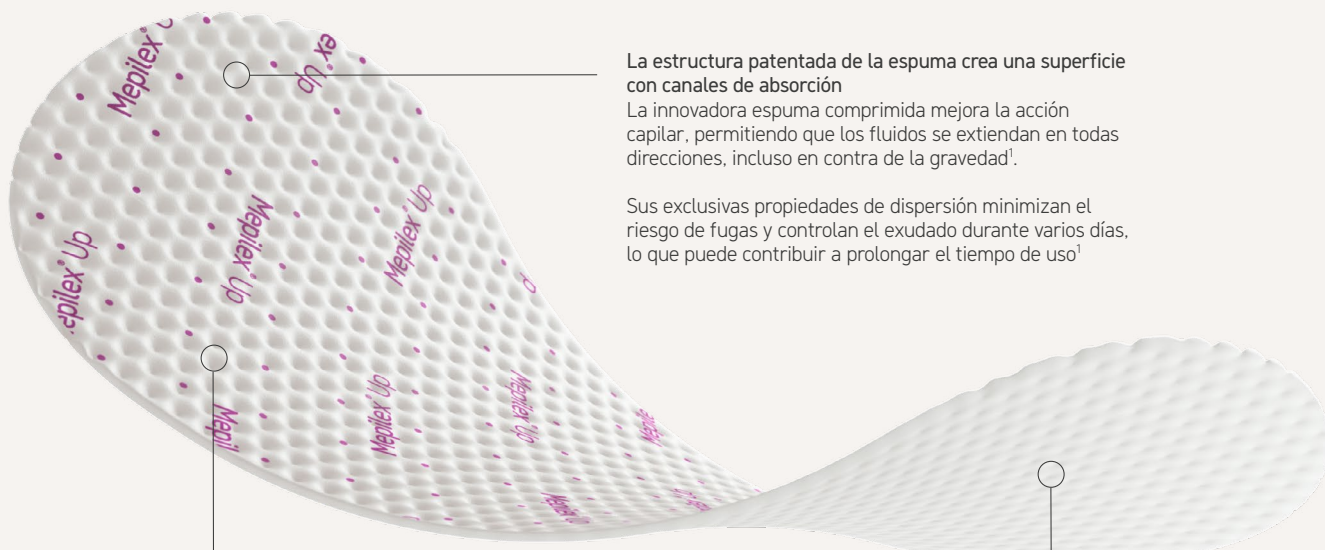

La estructura patentada de la espuma crea una superficie con canales de absorción

La innovadora espuma comprimida mejora la acción capilar, permitiendo que los fluidos se extiendan en todas direcciones, incluso en contra de la gravedad¹.

Sus exclusivas propiedades de dispersión minimizan el riesgo de fugas y controlan el exudado durante varios días, lo que puede contribuir a prolongar el tiempo de uso¹

Film posterior transpirable y resistente al agua
Retiene el fluido dentro del apósito a la vez que permite que se evapore el exceso de humedad.

Lámina de silicona Safetac®
Nuestra tecnología proporciona una adherencia suave al tiempo que minimiza el dolor y los daños en el lecho de la herida y en la piel perilesional²⁻⁴

A pesar de su reducido grosor, Mepilex® Up gestiona grandes volúmenes de exudado¹

- Altamente conformable y fácil de aplicar¹
- Capaz de gestionar niveles de exudado de bajo a muy exudativas¹

Capacidad única de extender el exudado uniformemente en todas direcciones, para una mejor gestión del exudado que otros apósitos de espuma^{1*}


- Mayor tiempo de uso y menos cambios de apósito¹
- Minimiza el riesgo de fugas¹, incluso bajo compresión
- Promueve una mejor calidad de vida de los pacientes
- Menor coste del tratamiento gracias a la reducción de los cambios de apósito

Se adapta fácilmente a su plan de cuidados

Mepilex Up puede utilizarse en una amplia gama de heridas exudativas, en todas las fases de cicatrización. Es muy adaptable y se integra a los planes de tratamiento, sin necesidad de cambiar la elección de los productos de compresión o los dispositivos de descarga.

* Cuando se comparan los resultados de las pruebas de laboratorio de Allevyn Gentle (Smith & Nephew), Biatain® Silicone NB (Coloplast), Aquacel® Foam (Convatec), Cutimed® Silitec® (Essity) según la norma EN13726:2023 Anexo E.

Instrucciones de uso Mepilex® Up

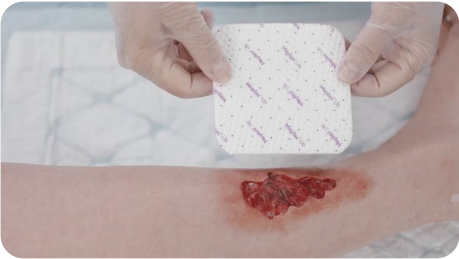

1. Limpie la herida de acuerdo con la práctica clínica. Seque bien la piel circundante. Seleccione el tamaño de apósito adecuado teniendo en cuenta lo siguiente: Para heridas poco exudativas, el apósito debe cubrir la piel circundante al menos 1 cm para heridas pequeñas y 3 cm para heridas grandes. Para heridas con exudado de moderado a alto, independientemente del tamaño de la herida, el apósito debe cubrir la piel perilesional al menos 5 cm. El apósito puede cortarse para adaptarse a las distintas formas y localizaciones de las heridas.



2. Retire el primer papel protector. Aplique el lado adherente sobre la herida. Retire el papel protector restante y aplique suavemente el apósito sobre la piel. No estire el apósito.



3. Cuando sea necesario, fije Mepilex Up con una venda u otro tipo de fijación.

Descripción

Mepilex Up es un apósito altamente conformable que absorbe exudados de baja y alta viscosidad, mantiene un entorno húmedo en la herida y minimiza el riesgo de maceración. La capa de silicona suave (Safetac®) no se adhiere a la zona húmeda de la herida, pero se adhiere suavemente a la piel perilesional seca. Protege la herida y la piel y minimiza el dolor de los pacientes y el traumatismo de las heridas y la piel circundante al retirar el apósito.

Beneficios de Mepilex Up

- La innovadora espuma con canales de absorción mejora la acción capilar, permitiendo que los fluidos se extiendan en todas direcciones, incluso en contra de la gravedad¹
- Absorbe y distribuye los fluidos de alta y baja viscosidad
- Diseñado para minimizar las fugas¹ y el riesgo de maceración
- Su reducido grosor lo hace muy adaptable y fácil de usar¹

Presentaciones Mepilex Up (Sobres estériles)

Referencia	Tamaño (cm)	Uds/RET	Uds/TRP
212100	10 x 10cm	5	70
212300	15 x 15cm	5	25
212200	10 x 20cm	5	25
212400	20 x 20cm	5	25
212500	20 x 50cm	2	12

Presentaciones financiadas Mepilex Up (Sobres estériles)

C.N.	Tamaño (cm)	Uds/RET	Uds/TRP
486902	10 x 10cm	3	30
486910	15 x 15cm	3	18
494039	10 x 20cm	3	15

Tecnología Safetac. Menos trauma. Menos dolor.

Safetac® se adhiere suavemente a la piel íntegra pero no a la propia herida, evitando daños en la herida y piel perilesional y minimiza el dolor durante su retirada⁵⁻¹⁰. Safetac sella los bordes de la herida, evitando fugas de exudado, minimizando así el riesgo de maceración^{5,7,8,10,11,12}.

Indicaciones de uso

Diseñado para el tratamiento de lesiones con niveles de exudado de bajo a muy exudativas, con y sin terapia de compresión.

Precauciones

- No utilice Mepilex Up en pacientes y/o usuarios con hipersensibilidad conocida a los materiales/componentes del producto.
- No utilice junto a agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno. Sin embargo, Granudacyn® ha sido probado y evaluado como seguro para usar junto con Mepilex Up.
- Si observa signos de infección clínica como fiebre, enrojecimiento de la herida o piel perilesional, calor o hinchazón, consulte a un profesional sanitario para recibir el tratamiento adecuado.
- No reutilizar. Si se reutiliza puede deteriorarse el rendimiento del producto y producirse contaminación cruzada.
- Estéril. No utilizar si la barrera estéril está dañada o abierta antes del uso. No reesterilizar.



Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto o visite molnlycke.es¹

1. Mölnlycke Health Care. Data on File. 2024. 2. Zillmer R, et al. Biophysical effects of repetitive removal of adhesive dressings on peri-ulcer skin. J Wound Care 2006;15(5):187-191. 3. Waring M, et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. J Wound Care 2011;20(9):412-422. 4. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK. 4(1). 2008. 5. Strohal R, Mittlböck M, Müller W, Hämmerle G. Management of hard-to-heal leg ulcers with an acidoxidising solution versus standard of care: The MACAN study. Journal of Wound Care. 2021;30(9):694-704. 6. Mölnlycke Health Care. Data on File. 7. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 8. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing two foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 9. Rippon, M., Davies, P., White, R., Taking the trauma out of wound care: the importance of undisturbed healing. Journal of Wound Care 2012; 21 (8): 359-368. 10. Upton D, Solowiej K. The impact of atraumatic vs conventional dressings on pain and stress. Journal of wound care. 2012;21(5):209-15. 11. Van Overschelde, P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 12. Bredow J. et al. Randomised clinical trial to evaluate performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Poster presentation at WUWHS Congress, Italy, 2016.

Más información en molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta, 28050 Las Tablas (Madrid). Tel: +34 91 484 13 20. Mölnlycke, Safetac y Mepilex son marcas, nombres y logos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2025. Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.

