

Guía de aplicación

Mepilex[®] Up

Diseñado para minimizar el riesgo de fugas

- Capacidad única para distribuir los fluidos en todas las direcciones, incluso en contra de la gravedad¹
- Capacidad de gestión de fluidos superior a otros apósitos de espuma*^{1,2}
- Gestión eficaz de grandes volúmenes de exudado durante largos periodos de tiempo^{1,2}
- Capacidad para gestionar el exudado viscoso³
- Puede utilizarse en una amplia gama de heridas y localizaciones exudativas⁴



*Al comparar los resultados de las pruebas de laboratorio de Allevyn[◇] Gentle, Biatain[®] Silicone Non-Border, Allevyn[◇] Non Adhesive con el método de Fluthe y la capacidad de gestión de fluidos según la norma UNE 13726-1

Aplicación en pierna



Aplicación en pie



Aplicación en talón



Aplicación en dedo del pie



Aplicación en dedo - en cruz



Aplicación en codo



Aplicación en dedo de la mano



Cuando sea necesario, fije Mepilex® Up con una venda u otro tipo de fijación.

Tecnología Safetac®. Menos trauma. Menos dolor

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar los bordes de la herida. Para más información visite www.molnlycke.es



Sin Safetac



Con Safetac

Escanee el código QR para acceder a la plataforma My Mölnlycke y obtener información sobre el producto, instrucciones de uso de los apósitos y guías de aplicación.



my.molnlycke.com

Referencias: 1. Mölnlycke Health Care. Data on File 2022. 2. Mölnlycke Health Care. Data on File 2022. 3. Mölnlycke Health Care. Data on File 2022. 4. Weaver G, Crawford K. The use of Mepilex on dehisced amputation wounds. Wounds UK.2007;3(1).

Más información en www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta. 28050 Las Tablas (Madrid). Tel: +34 91 484 13 20. Mölnlycke, Safetac y Mepilex son marcas, nombres y logos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2025. Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados. Allevyn es una marca registrada de Smith&Nephew. Biatain es una marca registrada de Coloplast.

